

KASVOMASKIN OHJE

-Pue puhdas maski aina puhtain käsin. Laskokset edestä katsottuna alapäin, jotta ne eivät muodosta taskua pisaroille.

-Pidä maski puhtaana: Älä kosketa maskia käytön aikana

-Riisu maski koskettaen vain sen kiinnityskuminauhoja ja laita maski suoraan pesukoneeseen tai muovipussiin.

-Pese kädet ja pese maski joka käytön jälkeen.

-Maski on pestävä 90 asteessa.

-Muista, että esimerkiksi maskin koskettelu lisää epäpuhtauksia hengitysteiden edessä. Väärinkäytetystä maskista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

-Käytön aikana maskia ei voi riisua pois tai kaulalle ja esimerkiksi juoda tai syödä.

-Varmista, että jaksat hengittää hyvin maskin läpi.

-Huomaa, että kostunut maski läpäisee mikrobeja kuivaa helpommin.

-Älä käytä maskia jos sinulla on sydän- ja verenkiertosairauksien, astman tai keuhkohtaumataudin oireet voivat olla este käyttää suu-nenäsuojainta. Likainen maski voi aiheuttaa terveyshaitan.

-Tuotetta ei saa laittaa sellaisen ihmisen kasvoille, jolla on jo hengitysvaikeuksia. Tuote tulee poistaa heti henkilön kasvoilta, jos sen kanssa on vaikea hengittää. Kangasmaskit voivat aiheuttaa terveyshaittoja, etenkin jos henkilöllä on sydän- tai verenkiertotauteja, astmaoireita, keuhkohtaumatauti tai korkea ikä.

Maski ei anna käyttäjälleen varmaa suojaa esimerkiksi koronavirusta vastaan. Se saattaa kuitenkin suojata muita ihmisiä maskin käyttäjän hengitysteistä leviäviltä pisaroilta. Oireettoman taudinkantajan maskin käytöstä voi olla hyötyä esimerkiksi liikennevälineissä, kaupoissa jne. mutta siitä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä.

Maski on valmistettu kaksinkertaisesta Öko-tex 100 sertifioidusta kankaasta.

Öko-tex sertifioitu materiaali takaa sen, että raaka-aineet ovat tutkitusti haitta-aineettomia, väriaineet myrkyttömiä ja moderni tuotantotekniikka säästää energiaa ja vettä. Öko-tex 100 tuotteet ovat täysin turvallisia käyttäjilleen. Vaikka maskin kangas on turvallinen, suosittelemme maskin pesua ennen käyttöä. Tuote on valmistettu puhtain käsin, mutta pesu takaa turvallisen käytön.

HUOM! Kun kuminauha kuoleentuu, sen käyttöä ei enää suositella sellaisenaan.

Kestokäyttöisiin kasvosuojaiin voi vaihdattaa kuminauhat, kun ne ei enää ole riittävän napakat.

Pyydä tarjous kuminauhan vaihdosta; vormu@vormu.fi

**VALMISTAJA;
VORMU OY
Niittaajantie 7
26820 RAUMA**

**Puh 02-8240100
vormu@vormu.fi
www.vormu.fi**